

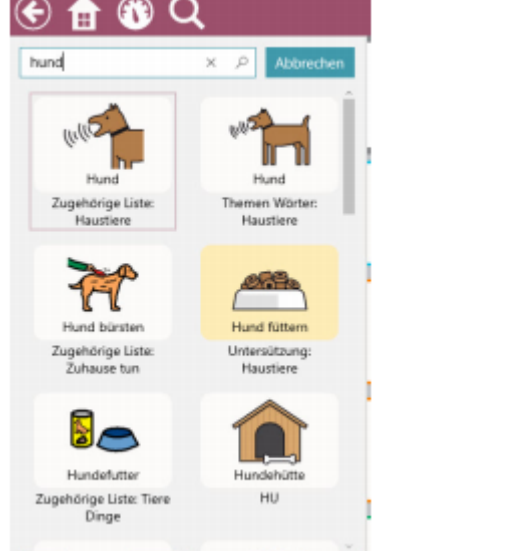

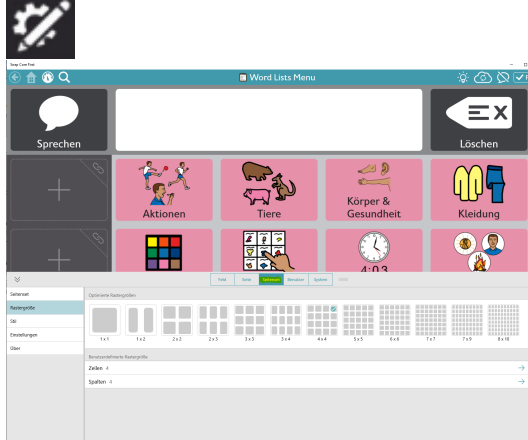

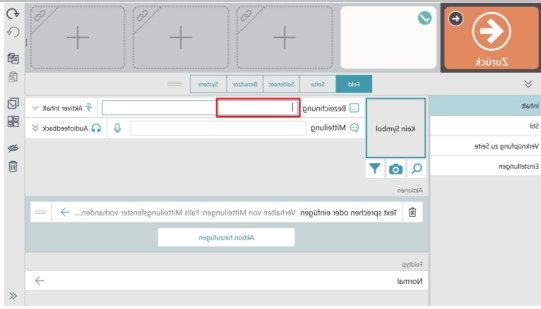

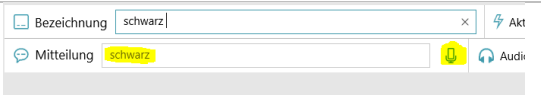



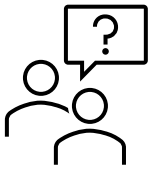


Snap and Core

Neben der Kurzanweisung können Sie sich mit dem QR-Code das Erklärvideo bequem auf dem Handy oder Tablet anschauen. Einfach mit der Kamera den QR-Code erfassen und den Anweisungen folgen.

	<p>Übersicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linke Seite: fixe Navigationsleiste für Zugang zu diversen Vokabularen • Oben: Suche, Synchronisation und Bearbeiten • Rechte Seite: Zugang zu weiteren Vokabularseiten 	
	<p>Suchen:</p> <p>Mit der Lupe kann nach Wörtern gesucht werden. Es werden alle Resultate angezeigt und mit dem Pfad beschrieben. Nach dem Antippen des gewünschten Symbols wird man schrittweise zum Symbol geführt.</p>	
	<p>Seiteneinstellungen:</p> <p>Nach Drücken des Bearbeitenbuttons kann man unter Seitenset alle Änderungen vornehmen, die alle Seiten gleichzeitig betreffen; analog dazu lassen sich unter Seite Einstellungen vornehmen, die nur die aktuelle Seite betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rastergröße • Farben • Vokabularinhalt 	

	<p>Feld verändern: Unter Feld lassen sich alle feldspezifische Änderungen vornehmen wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Symbolsuche • Sprachausgabe des Feldes • Funktion 	
---	--	---

	<p>Aussprache: Als Standard wird der eingegebene Text vorgelesen. Die Aussprache kann im Feld selbst korrigiert werden oder global mit einer Sprachausnahme (<i>Benutzer/Sprachausnahme</i>) vorgenommen werden. Alternativ lässt sich über das Mikrofon eine Aufnahme machen.</p>	
	<p>Backup: Das Backup lässt sich auf verschiedene Weise realisieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Synchronisieren auf die Tobii Dynavox Cloud • Lokal (Benutzer/In lokale Datei sichern) 	
	<p>Für weiter Fragen oder technischen Problemen stehen wir ihnen gerne zur Seite:</p> <p>support@b-at.ch 044 597 50 55</p>	